

UROLIS



Références	Désignation
09/8000	Urinal UROLIS
09/8003	Adaptateur féminin

Atouts :

- L'Urolis s'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée.
- Grâce à son système anti-déversement, le contenu de l'Urolis ne se déverse pas dans le lit.
- Un adaptateur féminin s'emboitant directement sur le cône est disponible.
- L'utilisation et l'entretien de l'Urolis sont facilités par ses systèmes d'ouverture et de fermeture : tourner la bague et le cône se retire facilement.
- Bouchon de vidange avec joint incrusté.
- Graduations de niveau.
- Capuchon de sécurité anti-odeur.
- Poignée ergonomique.

Description :

- Profondeur : 24 cm, Hauteur : 14 cm
- Longueur hors tout : 30 cm
- Largeur avant : 8,5 cm , largeur arrière : 14 cm
- Poids net Urolis : 330 g, adaptateur : 30 g
- Contenance : 1,5 litres



Composition :

- Récipient : Polyéthylène Haute Densité.
- Capuchon : Polyéthylène Basse Densité.
- Cône : Polyéthylène Haute Densité, joint en élastomère, bille en acier inoxydable.
- Bouchon de vidange : Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre, joint élastomère.
- Adaptateur féminin : mélange d'élastomère et de polypropylène homopolymère.


Entretien :



Retirer le capuchon au niveau de la poignée



Retirer l'adaptateur féminin. Tourner la bague pour retirer l'embout facilement

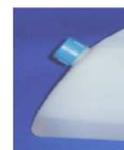

Retirer le bouchon de vidange

- Eau et désinfectant habituel (type javel)
- Autoclave 130°C

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 31 x 15 x 14 cm.
- Poids brut : 440 g, (+30 g avec l'adaptateur féminin).